

## Arbetsinstruktion Mellanstäd operation NLN

### Material:

Se till att all material som behövs finns packad på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

### Arbetsgång

- Avtorkning av uppdukningssbord
- Avtorkning av operationslampor
- Avtorkning av mediabrygga och apparaturer
- Avtorkning av operationsbord med tillhörande madrasser inkl socklar vid hissbara bord
- Avtorkning av narkosapparat inkl. upphängning av sladdar
- Avtorkning av röntgenapparat
- Avtorkning av blodtrycksmanschetter
- Avtorkning av protesstöd
- Rengör golvet med microfibermopp och allrengöringsmedel
- Avtorkad utrustning körs ut från operationssal inför städning
- Vid angivelse på informationstavla att snitt har genomförts ska bordet i föreberedelserummet avtorkas
- Sätta i nya tomma blodpåsar i sugbehållare
- Registering av antal utförda mellanstädningar redovisas dagligen till kontaktperson

### Säkerhet

Ha rätt skyddsutrustning.

Handläggare  
Johan Tilly

Dokumentansvarig  
Verksamhetsservice

Beslutad av

Dokumentdatum  
2019-06-25

Giltig från

Dokumentnummer  
19-3493

Dokumentkategori  
Rutinbeskrivning

Revisionsnummer  
01

## Miljö

Släng avfall på sin tilltänkta plats  
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen  
befinner sig i lokalen  
Använd inte mer material och vatten än  
nödvändigt  
Undvik kemikalier så långt det är möjligt