

Sortimentsöversikt

Bälte

Sele

Band

Vadmatta

Bendelare

Innehåll

Arbetsgång för montering av bälten och selar	1
Positioneringsbälte med en fästpunkt.....	1
Positioneringsbälte 1 fästpunkt Weda	1
Sittbelt Comfort Pro	1
Positioneringsbälte med två fästpunkter	2
Positioneringsbälte med 2 fästpunkter Weda.....	2
Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro	2
Antirotationsbälte med två fästpunkter	3
Höftbälte 4-punkt - Antirotationsbälte	3
Lårsele	3
Lårsele	3
Bröstsele	4
Bröstbälte Monoflex	4
Bröstsele - H-sele.....	4
Bröstsele - Sternumstöd.....	5
Bröstsele - Thoraxsele	5
Monteringsbeslag till bröstsele	6
Fäste mellan körhandtag FMK	6
Övre monteringsbeslag	6
Fäste för bröstsele	6
Band för arm	7
Handledsmanschett – Armbindel med plös.....	7
Band för fot	7
Fotrem med kardborre	7
Fotrem med skidlås.....	7
Vristsele Bodypoint, All-in-one	8
Vadmatta	9
Vadmatta.....	9
Vadmatta Aeromesh	9
Bendelare	10
Bendelare.....	10
Övrigt	10
Universalband	10

Arbetsgång för montering av bälten och selar

Montering av bälten och selar på hjälpmedel är ett förskrivaransvar. Hjälpmedelscentralen förmonterar aldrig bälten i samband med leverans eller reparation. Det är förskrivarens ansvar att montera och justera in bälten och selar.

Vid behov av hjälp vid montering bokas tid med tekniker. Förskrivare är med vid besöket och är ansvarig för var bältet och selet ska placeras och hur det ska justeras in. Rådgivning av bälten och selar samt placering kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk www.anatomicsitt.com

Positioneringsbälte med en fästpunkt



Positioneringsbälte 1 fästpunkt Weda

Används för positionering av bäckenet.
Ett drag från mitten.

Leverantör Fälandbo Production AB

Positioneringsbälte S 1 fästpunkt	10423
Positioneringsbälte M 1 fästpunkt	10424
Positioneringsbälte L 1 fästpunkt	18437



Sittbelt Comfort Pro

Används för positionering av bäckenet.
Positioneringsbältet har 1 fästpunkt per sida.
Storlek S har ett drag från mitten.
Storlek L har två drag från sidorna.

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Sittbelt Comfort Pro stl S 725 spänne	32694
Sittbelt Comfort Pro stl M 740 spänne	40235
Sittbelt Comfort Pro stl L 742 spänne	32693

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk www.anatomicsitt.com

Positioneringsbälte med två fästpunkter

Positioneringsbälte med 2 fästpunkter Weda



Används för positionering av bäckenet.
Ett drag från mitten.

Leverantör Fälandbo Production AB

Positioneringsbälte M 2 fästpunkter 10421

Positioneringsbälte L 2 fästpunkter 10422

Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro



Används för positionering av bäckenet.
Positioneringsbältet har 2 fästpunkter per sida.
Storlek S och M har ett drag från mitten.
Storlek L och XL har två drag från sidorna.

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro
stl S, höftbredd 15-27 cm 32692

Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro
stl M, höftbredd 27-37 cm 32691

Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro
stl L, höftbredd 35-45 cm 32689

Höftbälte 4-punkt - Sittbelt Pro
stl XL, höftbredd 45-60 cm 40767

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk www.anatomicsitt.com

Antirotationsbälte med två fästpunkter



Höftbälte 4-punkt - Antirotationsbälte

Ger mycket positionering och motverkar skjuveffekt och rotation av bäckenet.

Leverantör Anatomic SITT AB
www.anatomicsitt.se

Höftbälte 4-punkt Antirotationsbälte stl XS, HB 15-25 cm	37193
Höftbälte 4-punkt Antirotationsbälte stl S, HB 25-32 cm	35848
Höftbälte 4-punkt Antirotationsbälte stl M, HB 30-42 cm	34709
Höftbälte 4-punkt, Antirotationsbälte stl L, HB 40-60 cm	37732

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk www.anatomicsitt.com

Lårsele



Lårsele

För brukare som kanar eller tenderar att glida ur rullstolen.

Lårsele kan användas både med och utan ett höftbälte.

Det finns en fästmetod.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Lårsele stl Small	40645
Lårsele stl Medium	40644
Lårsele stl Large	40643

Bröstsele

Bröstbälte Monoflex



Ett dynamiskt bröstbälte som erbjuder fria armrörelser och ger ett jämt och bekvämt stöd för bålen. Fixspännen på var sida om bältet. Bröstbälte ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Bröstbälte Monoflex XS	32918
Stödytans längd och bredd 32 x 7,5 cm	
Bröstbälte Monoflex S	32919
Stödytans längd och bredd 40 x 9 cm	
Bröstbälte Monoflex M	32380
Stödytans längd och bredd 48 x 10 cm	
Bröstbälte Monoflex L	30256
Stödytans längd och bredd 55 x 11,5 cm	
Bröstbälte Monoflex XL	32920
Stödytans längd och bredd 64 x 13 cm	

Bröstsele - H-sele



H-selen ger stöd till både axelparti och bål. Den används vid rotation och passar användare som behöver bra uppsträckning av bål och axlar. H-selen ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör Anatomic SITT AB
www.anatomicsitt.com

Bröstsele - H-sele Pro stl XS	32698
Axelbredd 18-24 cm	
Bröstsele - H-sele Pro stl S	31669
Axelbredd 22-30 cm	
Bröstsele - H-sele Pro stl M	30930
Axelbredd 28-40 cm	
Bröstsele - H-sele Pro stl L	32699
Axelbredd 38-60 cm	



Bröstsele - Sternumstöd


Sternumstöd är designat för att ge ett behagligt stöd för bål och sternum. Speciellt framtaget för brukare som faller framåt med bålen.

Sternumstödet ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Bröstsele - Sternum Pro stl XS	32695
Axelbredd 18-24 cm	
Bröstsele - Sternum Pro stl S	30959
Axelbredd 22-30 cm	
Bröstsele - Sternum Pro stl M	32696
Axelbredd 28-40 cm	
Bröstsele - Sternum Pro stl L	32697
Axelbredd 38-60 cm	

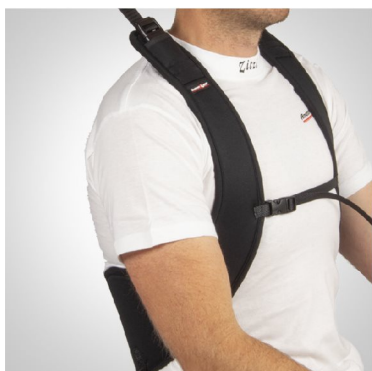

Bröstsele - Thoraxsele

Thoraxsele är framtagen till användare med låg muskeltonus. Selen hjälper till att positionera genom ett lyft nerifrån ländryggen.

Thoraxselet ska användas i kombination med höftbälte.

Kontakta hjälpmedelskonsulent

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Bröstsele -Thoraxsele Pro stl XS	44611
Bålbredd 20-25 cm	
Bröstsele - Thoraxsele Pro stl S	44612
Bålbredd 25-30 cm	
Bröstsele – Thoraxsele Pro stl M	44404
Bålbredd 30-35 cm	
Bröstsele - Thoraxsele Pro stl L	44674
Bålbredd 35-40 cm	

Monteringsbeslag till Bröstsele



Fäste mellan körhandtag FMK

Monteringssats för montering av h-sele och sternumstöd. Monteras runt rullstolens körhandtag/rygggrör.

Förhöjningsstag beställs separat.

Kontakta hjälpmedelstekniker innan förskrivning för besked om montering är möjlig på rullstolsmodell och bredd, ska monteras av tekniker.

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Fäste mellan körhandtag, FMK stl 1	35708
passar rullstolsbredd 22 - 42 cm	
Fäste mellan körhandtag FMK stl 2	35397
passar rullstolsbredd 32 – 52 cm	
Förhöjningsstag 25 mm FMK	35398

Övre monteringsbeslag




Används för att montera H-sele/sternumstöd vid fast ryggplatta. Levereras i par.

Kontakta tekniker innan förskrivning om montering är möjlig på ryggplattan, ska monteras av tekniker

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomicsitt.com

Övre monteringsbeslag lång 200mm	26439
----------------------------------	-------

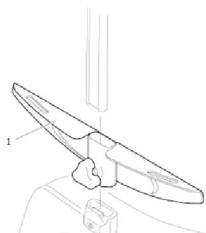

Fäste för bröstsele

Används för att montera H-sele/sternumstöd på komfortrullstolarna Azalea och Azalea flex 3. Monteras på huvud/nackstödet stolpe.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Fäste för bröstsele övre	34591
--------------------------	-------

Band för arm



Handledsmanschett – Armbindel med plös

Armbindeln monteras diagonalt för att förhindra översträck så att armarna inte hamnar utanför sittsystemet eller rullstolen. Levereras i par.

Kontakta hjälpmedelskonsulent

Leverantör Anatomic SITT AB

www.anatomic sitt.com

Handledsmanschett – Armbindel med

plös stl Small omkrets handled 13 cm

46493

Handledsmanschett – Armbindel med

plös stl Large omkrets handled 21 cm

46497

Band för fot



Fotrem med kardborre

Förhindrar att foten glider framåt på fotplattan.

Leverantör Sköldens Industri AB

<http://www.skolden.se/>

Fotrem med plös fast 60 cm kardborre

10479

Fotrem med plös elastisk 50 cm kardborre

10478



Fotrem med skidlås

Förhindrar att foten glider framåt på fotplattan.

Leverantör Sköldens Industri AB

<http://www.skolden.se/>

Fotrem med plös fast 60 cm skidlås

23445

Vristsele Bodypoint, All-in-one



Genom att kroppen balanseras från foten får brukaren ökad kontroll över bål och huvud. Fotleden säkras medan resten av foten kan röra sig naturligt. Belastning på leden minskar och möjligheten till en bekväm och hållbar sittställning med kontroll för hela kroppen ökar.

Leverantör HEA Medical AB

www.heamedical.se



Storlek X-Small ankelomkrets 14-17 cm	40786
Storlek Small ankelomkrets 17-20 cm	40784
Storlek Medium ankelomkrets 19-23 cm	39814
Storlek Large ankelomkrets 22-29 cm	39813
Storlek X-Large ankelomkrets 28-33 cm	39729

Vadmatta



Vadmatta

Stoppad vadmatta av dartexmaterial med kardborrelåsning.
Passar alla bredder på rullstol Azalea och Azalea flex 3.

Bredd 77 cm, höjd 20 cm.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Vadmatta

36229



Vadmatta Aeromesh

Vadmattan är tillverkad av nättyg (mesh fabric på engelska), är luftig och hudvänlig, ytan är stickad på ett luftigt sätt. Kardborrelåsning.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Vadmatta Aeromesh S 26808

Sittbredd 35 – 42 cm, höjd 18,5 cm

Vadmatta Aeromesh M 26809

Sittbredd 40 – 50 cm, höjd 21 cm

Vadmatta Aeromesh L 26506

Sittbredd 45 – 55 cm, höjd 23,5 cm

Bendelare



Bendelare

Används för att separera benen. Stabilt skum med viss svikt.

Överdrag beställs separat.

Leverantör Care of Sweden AB www.careofsweden.se

Bendelare 9 cm	27851
----------------	-------

Överdrag Bendelare 9 cm	31627
-------------------------	-------

Bendelare 12 cm	27852
-----------------	-------

Överdrag Bendelare 12 cm	31628
--------------------------	-------

Bendelare 15 cm	27853
-----------------	-------

Överdrag Bendelare 15 cm	31629
--------------------------	-------

Övrigt



Universalband

Används som stöd för över- och underkropp eller över benen. Bandet har kardborrelås.

Längd 148cm.

Leverantör HEA Medical AB www.heamedical.se

Universalband elastiskt S, bredd 8 cm	26517
---------------------------------------	-------

Universalband elastiskt L, bredd 11 cm	26567
--	-------

Universalband elastiskt XL, bredd 15 cm	36705
---	-------

Förlängningsband universalband S	40780
----------------------------------	-------

Förlängningsband universalband L	40693
----------------------------------	-------

Förlängningsband universalband XL	40781
-----------------------------------	-------