


Sortimentsöversikt

Förebyggande och behandlande madrasser mot trycksår

Innehåll

| | |
|---------------------------------------|----|
| Distantsmadrass PRIMA 6 | 4 |
| Madrass COMCO 3-delad..... | 5 |
| Madrass Optimal 5 Zon BM | 6 |
| Madrass Stratum Sense..... | 7 |
| Madrass CuroCell S.A.M..... | 8 |
| Madrass CuroCell 3 CX13 | 9 |
| Madrass CuroCell S.A.M PRO CF10 | 10 |
| Madrass Static Air HZ | 11 |
| Madrass Star Matt..... | 12 |
| Madrass ROHO..... | 13 |
| Madrass CuroCell A4 CX 10 | 14 |
| Madrass CuroCell A4 CX 15 | 15 |

| | |
|------------|--|
| Kategori 1 | Vävnadsskada med ökad rodnad. Inflammationstecken. Rodnad som inte bleknar vid tryck. |
| Kategori 2 | Hål på huden, rött sår utan nekroser. |
| Kategori 3 | Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion och fistlar. Litet ingångshål. |
| Kategori 4 | Genom alla hudlager ner till muskler och ben |

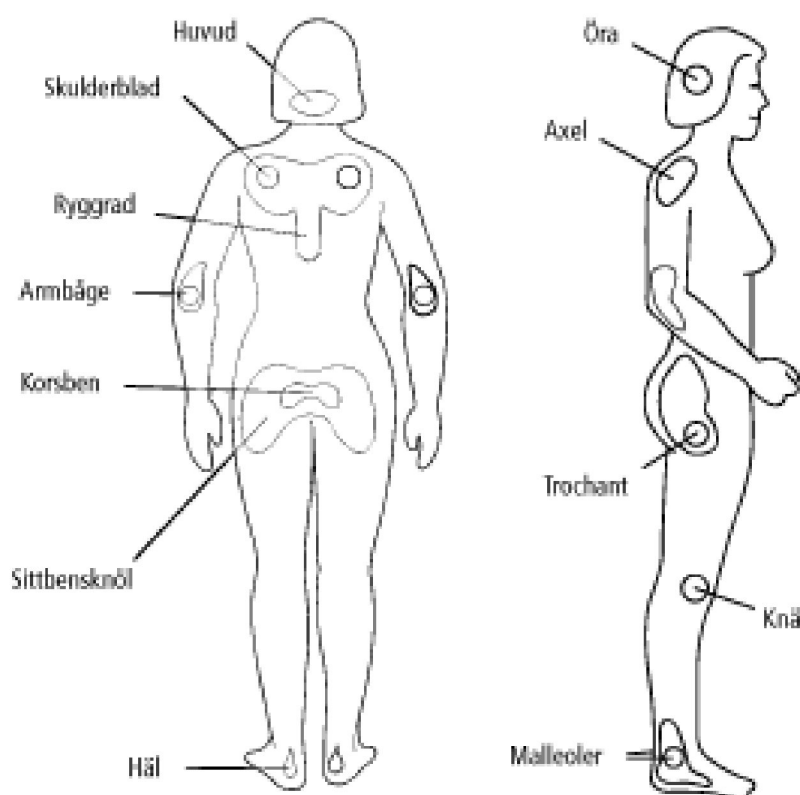

Utsatta kroppspartier:

Sätessregionen och hälsarna är de områden som är mest drabbade av trycksår. Även andra kroppspartier är utsatta och bör få regelbunden kontroll och avlastning.

Läs mer: <http://www.vardhandboken.se/texter/trycksar/riskbedomning>

Hygienöverdrag = Inkontinensöverdrag

Distantsmadrass PRIMA 6



- Distansmadrassen placeras under behandlande madrass i sortiment som inte kan läggas direkt på sängbotten. Kan ej förskrivas som ersättningsmadrass.
- Lämplig för användning i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö.
- Madrasskärna av kallsaum
- Levereras komplett med hygienöverdrag.

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max Obegränsad vikt. Maxvikten på ovanliggande madrass gäller.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd |
| 46069 | 85 x 200 x 6 cm |
| 46070 | 90 x 200 x 6 cm |
| 46071 | 105 x 200 x 6 cm |

Madrass COMCO 3-delad



- Förebyggande madrass till patienter med låg risk för trycksår. Motverkar risken för skjuv.
- Lämplig för användning i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö.
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Varje del i madrassen är fylld med silikoniserad polyesterfiber. Tyg mikrofiber.
- Levereras komplett med överdrag.
- För förskrivning av madrasskydd, vänligen kontakta konsulent.

Leverantör: COMCO www.comco.se

Brukarvikt max 0-95kg

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | Bredd x längd |
| 26866 | 90 x 200 cm |
| 34012 | 105 x 200 cm |
| 30421 | 120 x 200 cm |

Madrass Optimal 5 Zon BM



- Förebyggande madrass och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med **sårkategori 2**
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Madrasskärna av kallsaum.
- Levereras med hygienöverdrag.

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0-150kg

Artikelnummer Bredd x längd x höjd

22771 85 x 200 x 6 cm

34509 90 x 200 x 6 cm

24745 105 x 200 x 6 cm

31 087 Tillbehör Hygienöverdrag
90 x 200 x 6 cm

| | |
|--------|---|
| 48 472 | Förlängningsdel 90x10x14 cm (kontakta konsulent) |
| 48 473 | Förlängningsdel 105x10x14 cm (kontakta konsulent) |

Madrass Stratum Sense



- Förebyggande och behandlande madrass till och med **sårkategori 2**
- Placeras direkt på sängbotten.
- Madrasskärna av kallskum.
- Levereras med hygienöverdrag.
- Får enligt regelverk endast förskrivas till brukare inskrivna i avancerad hemsjukvård.
- Förskrivs tillsammans med säng.
- Vid tveksamhet kontakta konsulent med arbetsområde madrasser/sängar.

Leverantör: COMCO www.comco.se

Brukarvikt max 0 - 150 kg

| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd |
|----------------------|-----------------------------|
| 44920 | 85 x 200 x 14 cm |
| 44921 | 90 x 200 x 14 cm |
| 44923 | 105 x 200 x 14 cm |

Madrass CuroCell S.A.M



Utgående artikel

- Behandlande till och med **sårkategori 2**
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Statisk madrass med luftceller, så kallat konstant lågtryck.
- Supportpump.
- Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".
- Levereras med hygienöverdrag, snabbkoppling av slangarna och kabelhållare.

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 200 kg

Artikelnummer Bredd x längd x höjd
39710 85 x 200 x 10 cm

Madrass CuroCell 3 CX13



Utgående artikel

- Behandlande till och med **sårkategori 3**
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Alternnerande växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska.
- Möjlighet att få statiskt läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning.
- Har hälfunktion, med möjlighet att stänga av enstaka celler i de tre nedersta cellerna.
- Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".
- Levereras med hygienöverdrag, kabelhållare och hälavlastning.

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 160 kg

Artikelnummer Bredd x längd x höjd
39715 85 x 200 x 13 cm

Madrass CuroCell S.A.M PRO CF10



- Används förebyggande och vid behandling till och med **sårkategori 3**
- Placeras på befintlig madrass.
- Statisk madrass med luftceller. S k konstant lågtryck. Supportpump.
- Systemet har omvårdnadsläge.
- Komfortreglage för att välja individuell komfortnivå. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå. Det innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minimerar ljud och vibrationer.
- Extra mjukt inneröverdrag för ökad komfort.
- Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".
- Levereras med extra mjukt inneröverdrag, hygienöverdrag, snabbkoppling av slangarna och kabelhållare.

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 250 kg

| | |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd |
| 44942 | 85 x 200 x 10 cm |
| 44943 | 90 x 200 x 10 cm |
| 44944 | 105 x 200 x 10 cm |

Madrass Static Air HZ



- Behandlande till och med **Sårkategori 3**
- Placeras direkt på sängbotten.
- Pumplös konstruktion med hög komfort som förenar luft och skum med luftceller, lågtrycksteknologi.
- Optimal för den palliativa vården.
- Luftburen hälffunktion reducerar effektivt trycket mot det extra utsatta hälpåret.
- Om man upptäcker att luftcellerna är tomma kan man prova att vika madrassen dubbel, 2-3 ggr och kontrollera att luftcellerna fylls på eller om det läcker någonstans. Händer det upprepade gånger, är brukaren förmodligen inte tillräckligt rörlig, då det är brukarens rörelser som gör att luften fylls på i hälcellerna. Någon form av lägesändring var 10:e minut, rekommenderas av leverantören.
- Levereras med hygienöverdrag.

Leverantör: Direct Healthcare Group www.directhealthcaregroup.com

Brukarvikt max 0 – 254 kg

| | |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd |
| 44926 | 85 x 200 x 15 cm |
| 44925 | 90 x 200 x 15 cm |
| 39731 | 105 x 200 x 15 cm |

Madrass Star Matt



Utgående artikel

- Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan utvecklat trycksår. Till och med **sårkategori 4**.
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar.
- Varje sektion består av 18 x 10 Neoprenceller, förbundna med kanaler.
- Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas där antidecubitus inte behövs.

Leverantör: ETAC www.etac.se

Brukarvikt max Obegränsad

Artikelnummer Bredd x längd x höjd
86 x 49 x 10 cm

40431 Star Matt madrassektion
40430 Utfyllnadsektion Star Matt

Tillbehör
40429 Hygienöverdrag 90 x 200 cm
40428 Förlängningsdel 15 cm

Restriktioner

Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare som ligger på Star Matt ska inte använda produkter som innehåller Lanolin (till exempel hudkrämen Decubal). Om produkter med Lanolin används så sker en kemisk reaktion på madrassen och cellerna går sönder.

Madrass ROHO



- Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan utvecklat trycksår. Till och med **sårkategori 4**
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar.
- Varje sektion består av 18 x 11 Neoprenceller, förbundna med kanaler.
- Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas där antidecubitus inte behövs.

Leverantör: Permobil www.permobil.com

Brukarvikt max Obegränsad

Artikelnummer Bredd x längd x höjd

85 x 50 x 9 cm

19728 ROHO sektion

10324 Utfyllnadsektion. OBS! Utgående – kan beställas om lagersaldo finns.

Tillbehör

31087 Hygientopp 90 x 200 cm

Restriktioner

Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare som ligger på ROHO ska inte använda produkter som innehåller Lanolin till exempel Decubal. Om produkter med Lanolin används så sker en kemisk reaktion på madrassen och cellerna går sönder.

Madrass CuroCell A4 CX 10

Obs! Kompletteras med kontrollenhet!



- Behandlande till och med. **sårkategori 4**
- Placeras ovanpå befintlig madrass.
- Helautomatisk växeltrycksmadrass. Behöver inte justeras manuellt.
- Tre programlägen; Pulserande, alternerande och konstant lågtryck.
- Hälfunktion
- Omvårdnadsläge
- Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".
- Levereras med hygienöverdrag och kabelhållare

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 200 kg

| | |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd |
| 44934 | 85 x 200 x 10 cm |
| 44935 | 90 x 200 x 10 cm |
| 44936 | 105 x 200 x 10 cm |

Kompletteras med
45294

Kontrollenhet till madrass A4

Madrassen har en individmärkning och kontrollenheten en individmärkning.

Madrass CuroCell A4 CX 15

Obs! Kompletteras med kontrollenhet!



- Behandlande till och med **sårkategori 4**
- Placeras direkt på sängbotten
- Helautomatisk växeltrycksmadrass. Behöver inte justeras manuellt.
- Tre programlägen; Pulserande, alternerande och konstant lågtryck.
- Hälfunktion
- Omvårdnadsläge
- Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".
- Levereras med hygienöverdrag och kabelhållare

Leverantör: Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 220 kg

| Artikelnummer | Bredd x längd x höjd | |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 44931 | 85 x 200 x 15 cm | Kontakta konsulent |
| 44932 | 90 x 200 x 15 cm | Kontakta konsulent |
| 44933 | 105 x 200 x 15 cm | Kontakta konsulent |

Kompletteras med
45294

Kontrollenhet till madrass A4

Madrassen har en individmärkning och kontrollenheten en individmärkning.