

Rutin – förskrivning trehjulig elrullstol i webSESAM

- **Bokning**

Kontakta kundtjänst 0771 – 405 406 för att boka elrullstol (Sterling Elite2 Plus) samt ett utprovningsrum.

– Hjälpmedelscentralen Eskilstuna (utprovningsrum Gnejsen)

Stolen finns att hämta i utprovningsförrådet mitt emot utprovningsrum Gnejsen.

– Hjälpmedelsfilialen Nyköping

Stolen finns att hämta utanför utprovningsrummet

– Hjälpmedelsfilialen Katrineholm

Stolen finns att hämta i hjälpmedelsförrådet.

- **Utprovning**

Brukare och förskrivare träffas tillsammans med brukaren på Hjälpmedelscentral/Hjälpmedelsfilial för utprovning.

Informationsfilm samt checklista för utprovning finns på HMC:s hemsida.

Efter utprovning, ta ställning till fortsatt förskrivning.

- **Förskrivning/Leverans**

Elrullstol med eventuella tillbehör förskrivs i webSESAM.

Art.nr 35404 – Sterling Elite 2 Plus

Ange sitthöjd och sida för käpphållare (vid behov) i fältet för övrig information

Leverans - skrymmande hjälpmedel. Leveranssätt chaufför väljs om hemleverans önskas. Kontaktuppgifter med adress och telefonnummer måste vara korrekta. Välj "Förskrivare ska kontaktas" för leveransbesked från chaufför.

Det är ett krav att godkänd förvaring hos brukaren är ordnad, innan leverans kan ske.

- **Körträning**

Förskrivaren ansvarar för körträning i brukarens närmiljö till dess att förskrivaren bedömer att brukaren klarar av att framföra elrullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Om förskrivning av elrullstol blir aktuell, fyller förskrivaren i låneförbindelsen och informationsdokumentet. Dokumenten finns på HMC:s hemsida under Blanketter/Eldrivna rullstolar. Låneförbindelsen (2 ex) läses igenom och undertecknas av brukaren. Ett undertecknat exemplar lämnas till Hjälpmedelskonsulent och ett får brukaren behålla själv.