

# Förskrivning av Handi One

Det finns två olika tillvägagångssätt vid förskrivning av Handi One. Val av tillvägagångssätt beror på förskrivarens vana och erfarenhet. Nedan beskrivs de olika tillvägagångssätten.

## 1. Utprovning tillsammans med konsulent

Önskas en utprovning tillsammans med en hjälpmedelskonsulent, fyller förskrivare i ett [Utprovningsunderlag kosmos](#) och skickar till HMC. Hjälpmedelskonsulent tar kontakt för tidsbokning

## 2. Utprovning utan konsulent

För att förskriva Handi One och göra anpassningarna på egen hand, se efterföljande sida.



- HandiOne förskrivs via funktionsartikel 48087-  
Handläggareärendet i Websesam. Handi One levereras ut till  
förskrivaren.
- Starta upp Handi One. Anpassa den utifrån patientens  
behov.
- Skapa ett användarkonto till patienten i myAbilia. Gå in i  
Handi One och koppla upp den mot patientens WiFi (finns i  
Android-inställningarna). Gå in under Inställningar –  
myAbilia och logga in med användarnamn och lösenord.  
Nu är Handi One synkroniserad mot myAbilia.
- Licensen i Handi One är giltig i 3 år. Därefter behöver en  
licensförlängning av Handi5 SW göras (se [Lathund-  
Licensförlängning](#)).
- Handi One kostar 400 kr per år för patienten.

Mer information om Handi One går att hitta på  
<https://www.abilia.com/sv>



REGION  
SÖRMLAND