

# Licensförlängning Handi5 SW/HandiOne, HandiKalender och MEMOPlanner

Samtliga av Abilia's Handi-produkter samt MEMOPlanner används tillsammans med en licens som är giltig i 3 år. I vissa av produkterna kan du fortsätta använda kalendern när licensen gått ut men support, uppdateringar eller synkning till MyAbilia fungerar inte längre. I andra blir du utloggad och kommer inte åt funktionerna alls.

När licensens giltighetstid har gått ut går den att förlänga med ytterligare tre år från slutdatum.

Förlängning sker genom att:

- Förskrivare lägger en arbetsorder till hjälpmedelstekniker i websesam.
- I arbetsordern fyller förskrivare i vilken individ arbetsordern avser samt att licensen ska förlängas. Hjälpmedelstekniker skickar sedan en beställning till Abilia.
- Aktiveringen av förlängningen sker på olika sätt i de olika kalendrarna. Se efterföljande sidor.



# Handi 5


## SW/HandiOne

För att aktivera förlängningen av licensen ska du gå till Handi **Inställningar**| **System**|**Licenshantering** och trycka på **Sök licensförlängning**. Se till att internetanslutning finns.


1



2

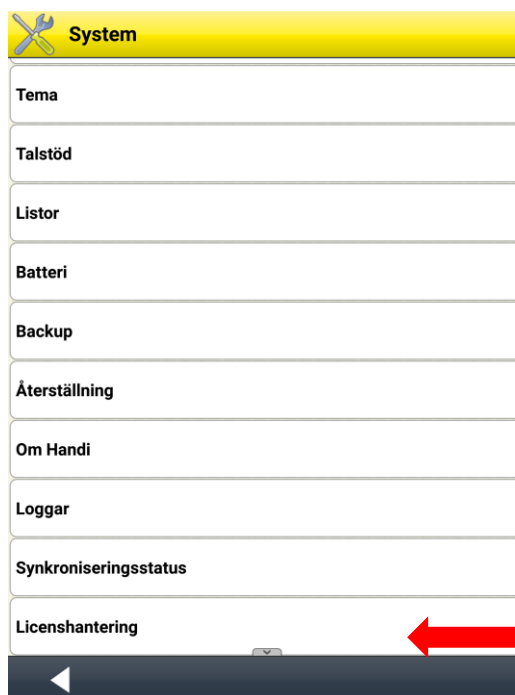


3

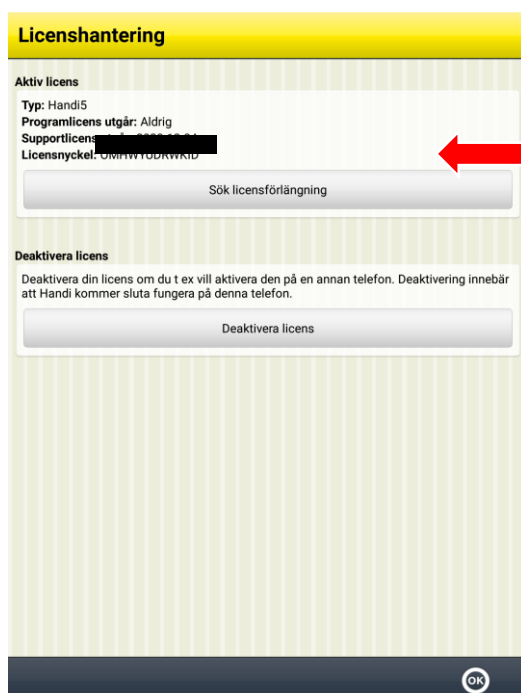


# HandiKalender


Abilia förlänger licenstiden med 3 år. En notis visas i enheten när det är gjort. Nästa gång HandiKalender startas uppdateras giltighetstiden

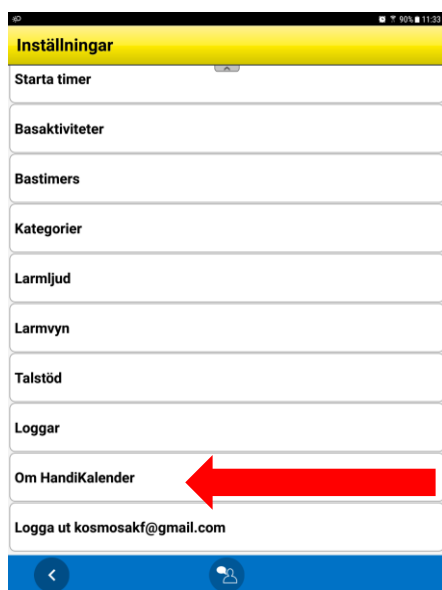

## 1. Android

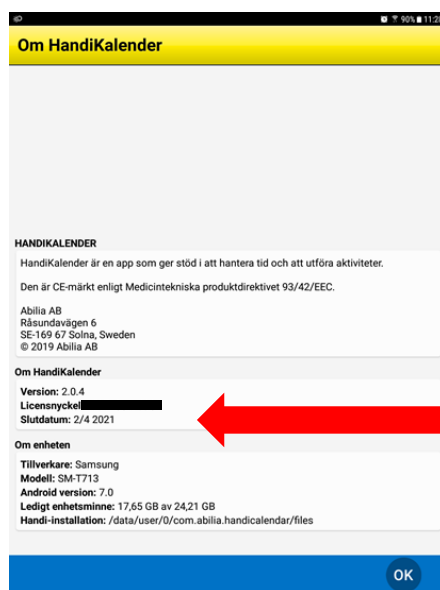

## 2 Android

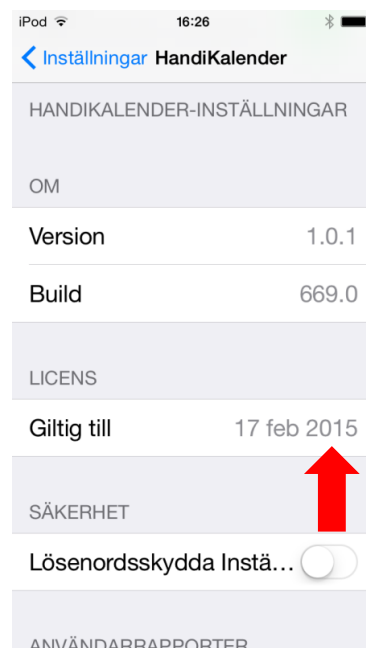

## 3. iOS


I Android kan du se slutdatumet på licensen i **Inställningar|Om Handikalender**

I iOS kan du se licensens giltighetstid i **Inställningar|HandiKalender**




REGION  
SÖRMLAND


# MEMOPlanner

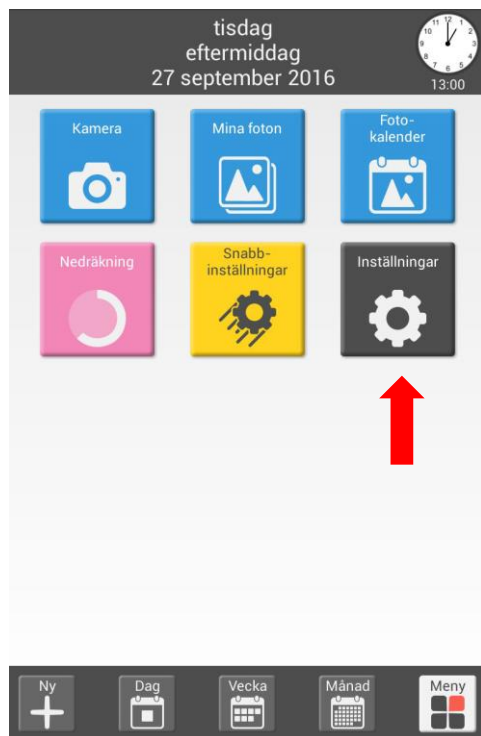

1

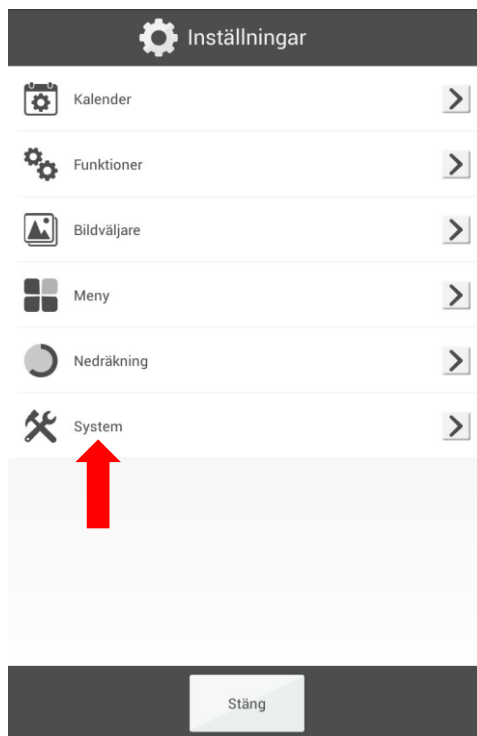

2

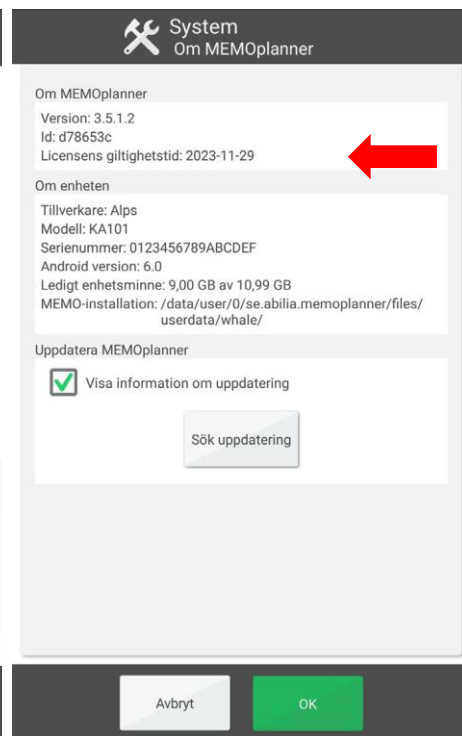

3

Abilia förlänger licenstiden med 3 år. Så fort enheten får internetanslutning uppdateras licensen i MEMOplanner. Den nya giltighetstiden visas i **Inställningar|System|Om MEMOplanner**.



REGION  
SÖRMLAND