

# Förskrivning av MEMOPlanner

Det finns två olika tillvägagångssätt vid förskrivning av MEMOPlanner. Val av tillvägagångssätt beror på förskrivarens vana och erfarenhet. Nedan beskrivs de olika tillvägagångssätten.

## 1. Utprovning tillsammans med Konsulent

Önskas en utprovning tillsammans med en hjälpmedelskonsulent, fyller förskrivare i ett [Utprovningsunderlag kosmos](#) och skickar till HMC. Hjälpmedelskonsulent tar kontakt för tidsbokning

## 2. Utprovning utan konsulent

För att förskriva MEMOplanner (Medium eller Large) och göra anpassningarna på egen hand, se efterföljande sida.



- MEMOplanner förskrivs via funktionsartikel 48087-  
Handläggareärendet i Websesam. MEMOplanner  
levereras ut till förskrivaren.
- Starta upp MEMOplanner genom att logga in på myAbilia  
med de medföljande användaruppgifterna till myAbilia.  
Anpassa MEMOplanner utifrån patientens behov.
- Gå in i MEMOplanner och koppla upp den mot patientens  
WiFi (finns i Android-inställningarna). Gå in under  
Inställningar – myAbilia och logga in med användarnamn  
och lösenord. Nu är MEMOplanner synkroniserad mot  
myAbilia.
- Licensen i MEMOplanner är giltig i 3 år. Därefter behöver  
en licensförlängning göras (se [Lathund-licensförlängning](#))
- MEMOplanner kostar 400 kr per år för patienten.
- Mer information om MEMOplanner går att hitta på  
<https://www.abilia.com/sv>

