



GoTalk NOW

Lathund för redigering i appen

Senast redigerad 2017-04-28
av Henrik Hasselqvist




LANDSTINGET
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

Startsidan_____	3
Skapa ny bok_____	4
Säkerhetskopiera-/återskapa bok från Dropbox_____	5
Redigera rutor och sidor_____	8
Lägg till ny sida_____	12
Snabbredigering av ny sida_____	15
Tangentbordssida_____	17
Redigera knappside _____	18
Radera, byt plats på, kopiera eller avaktivera en knapp _____	22
Lägg till bildside_____	23
Använda filmer_____	26



Startsidan

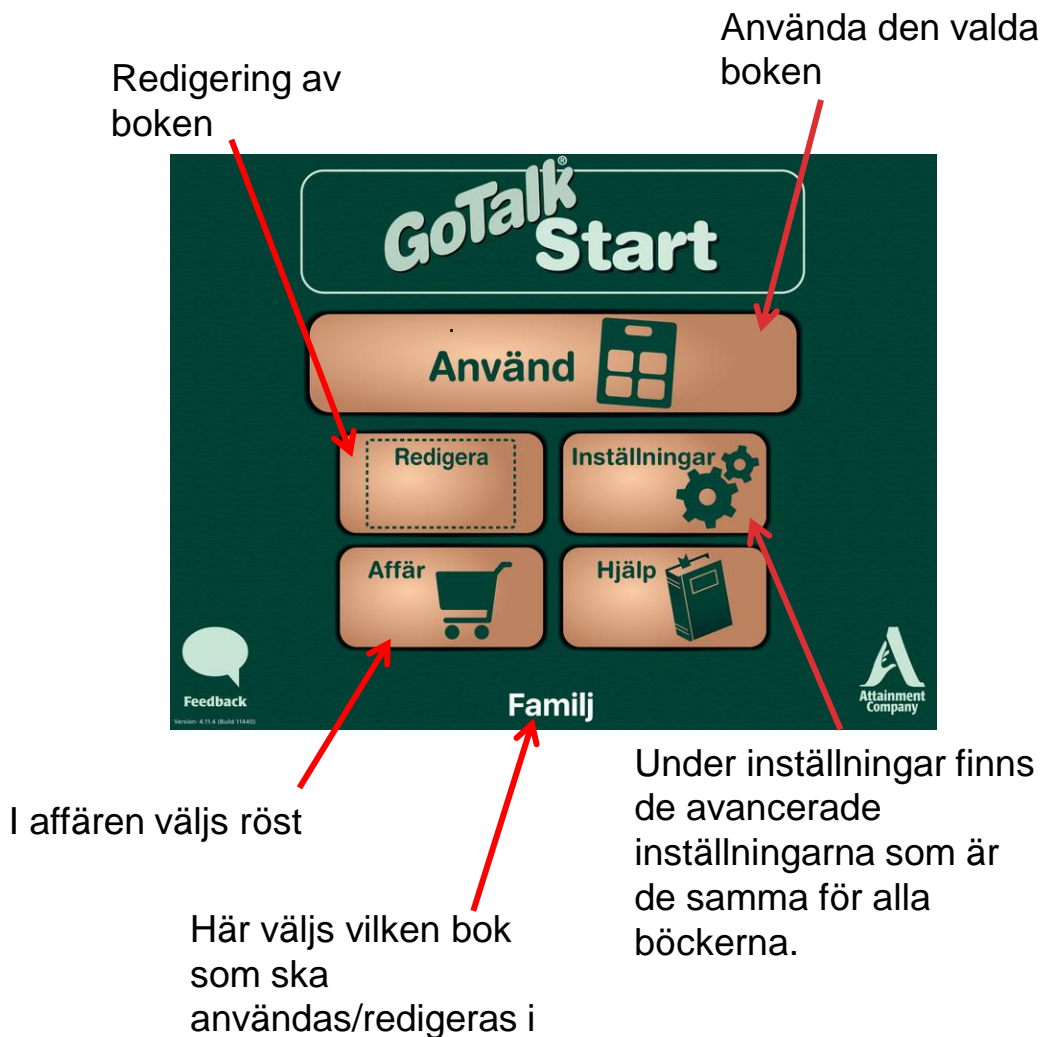


För att komma till startsidan när man är inne i en bok som användare drars tre fingrar uppifrån och ner över iPadens skärm eller så trycker man på hus-knappen i ca 7 sekunder.



Skapa ny bok

En bok är en samling sidor som tillsammans fungerar som t.ex. en kommunikationskarta. En bok skapas (eller väljs) där man kommer in genom att klicka på själva namnet på nuvarande aktiva bok på startsidan i appen.

Skapa en ny bok genom att klicka på +. Namnge din nya bok med t.ex. badrum, kök, vänner, skola, fritid osv.

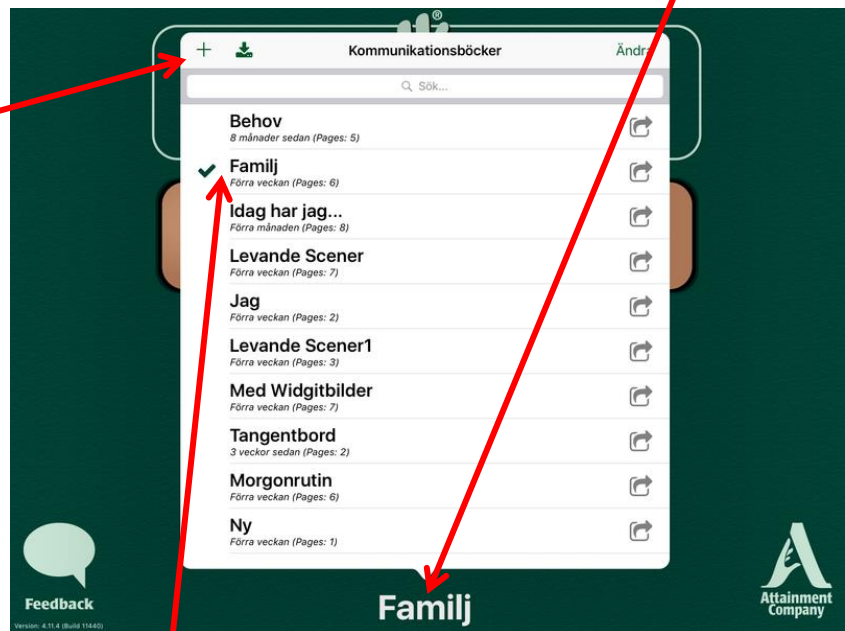


Klicka på namnet på en bok för att välja den som aktiv.



Säkerhetskopiera/ återskapa


För att byta namn på boken eller göra en exakt kopia trycker man på pilen bredvid boken och väljer sedan vad man vill göra.

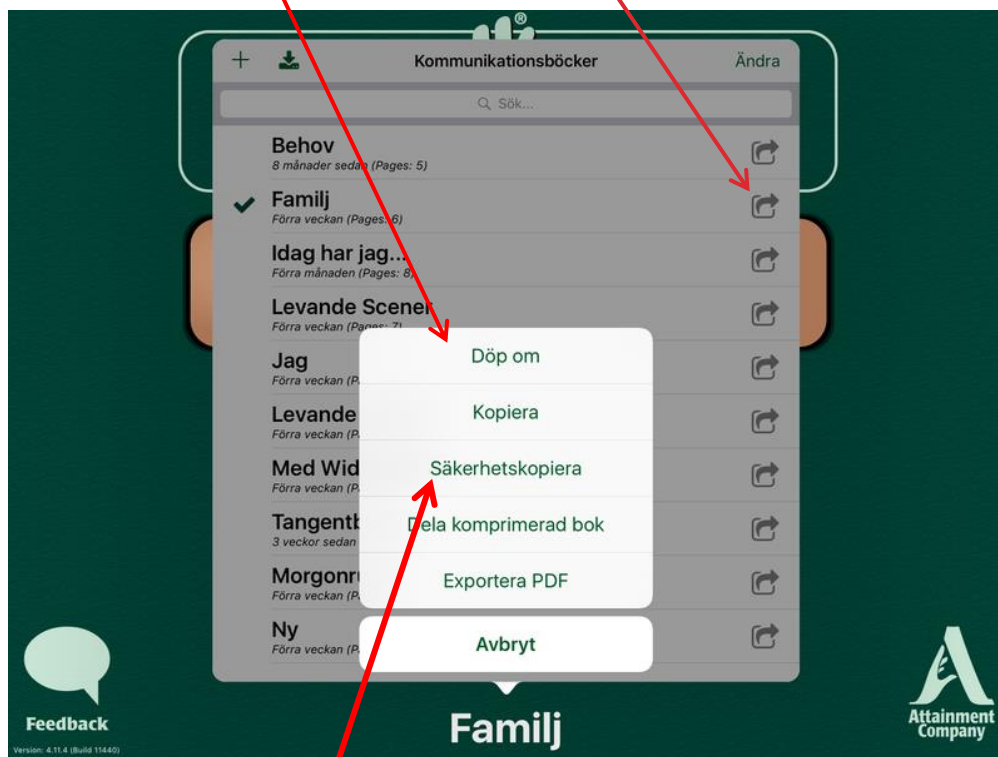


Det är viktigt att komma ihåg att säkerhetskopiera arbetet. Det görs genom att kopiera till Dropbox. Här kan man även återskapa från Dropbox om något gått förlorat.



Vid säkerhetskopiering eller återskapning via dropbox, välj via Dropbox

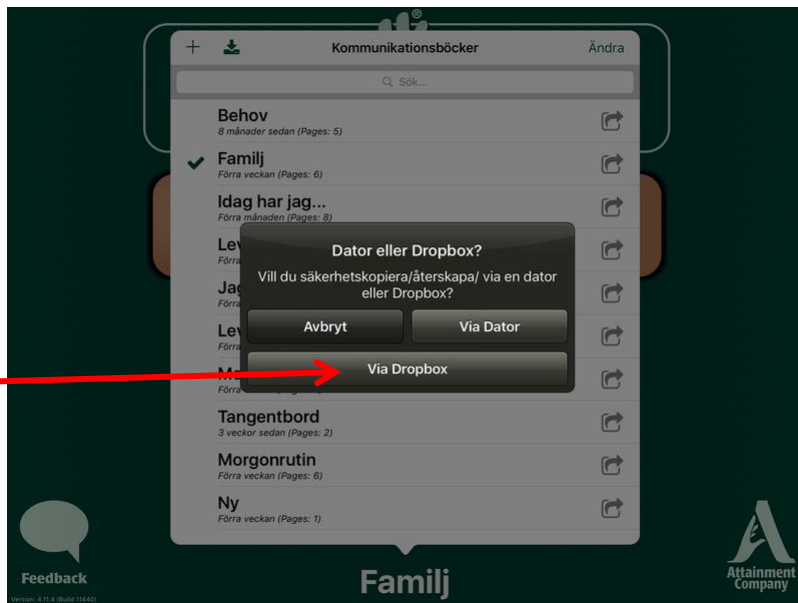


Välj om det ska göras en återskapning från Dropbox eller spara en kopia?

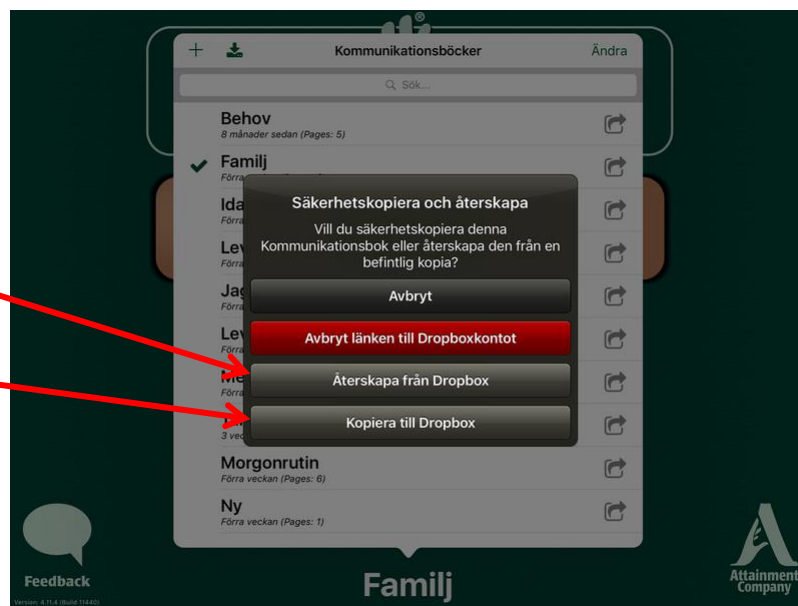

Vid säkerhetskopiering: Välj vilken mapp i Dropbox kopian ska sparas till eller skapa en ny.



Vid återskapa: välj vilken bok som ska återskapas. Om det inte finns någon bok i appen måste man först skapa en bok i valfritt namn vart man kan kopiera ner boken som ska återskapas. Se skapa ny bok sida 4.

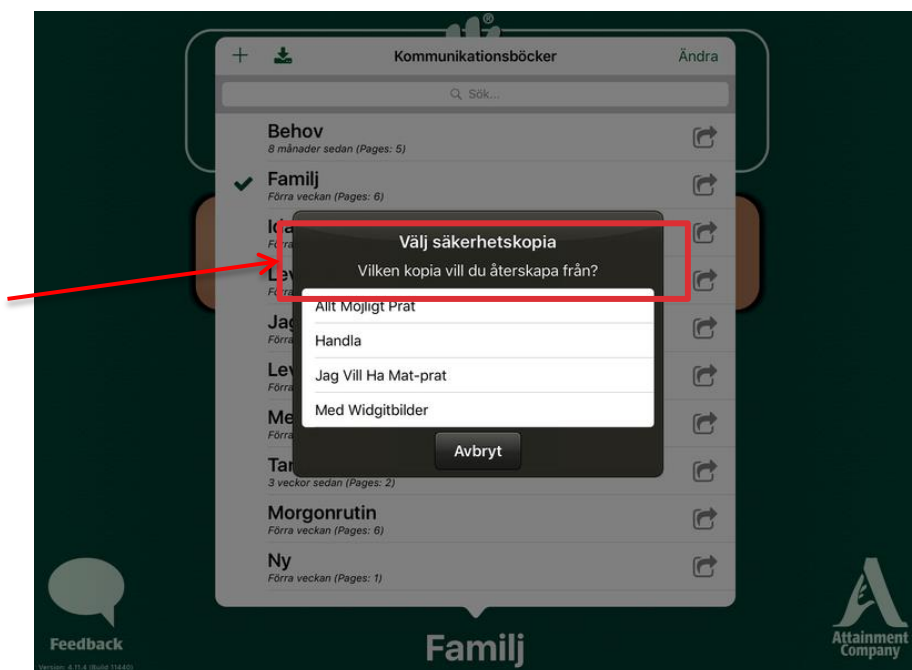

Redigera rutor och sidor



Tryck på redigera för
att redigera rutor och
sidor.



Menyraden

Menyraden är nu synlig nederst i bild.



Inställningar för själva sidan

Byta namn på sidan och lägga till en ikon

Byta sida eller lägga till ny sida


Lägg till snabb rutor – viktiga ord och fraser som följer med på varje sida i boken. OBS endast 4 rutor.

Inställningar för sidan




Välj antal rutor

Välj färg på bakgrunden

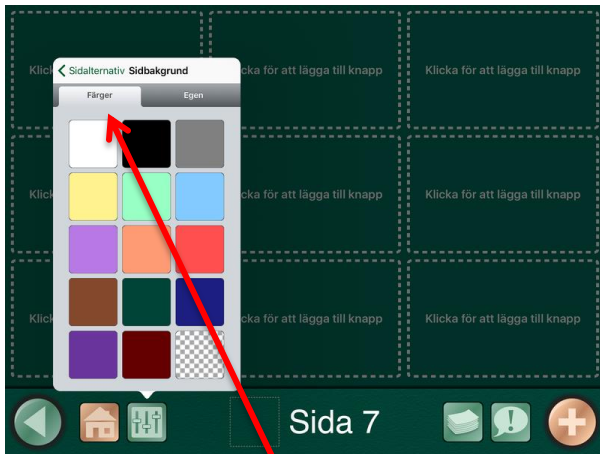

Välja mellan färdiga
färgförslag till bakgrunden

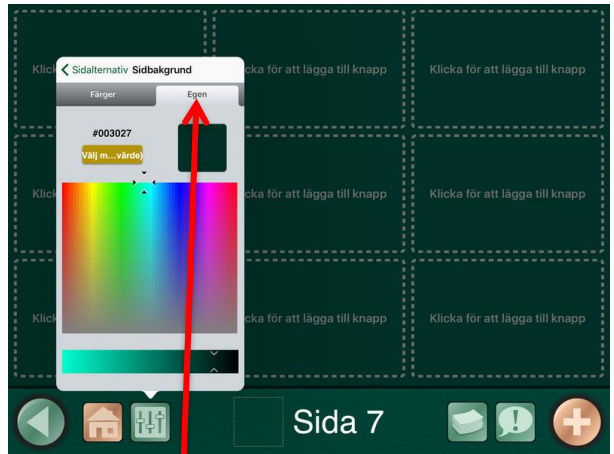


Eller en egen färg



Klicka på sidans nuvarande namn för att ändra namn på sidan
så det blir lättare att hitta i boken.




LANDSTINGET
SÖRMLAND

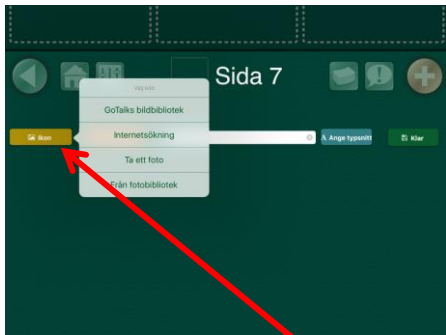

Lägg till en ikon för att lättare hitta rätt sida

Uttrycksfält

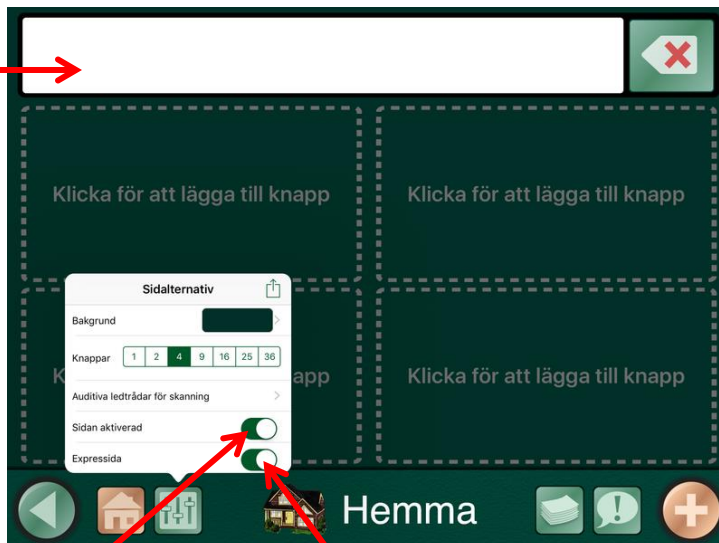

Välj om sidan inte ska synas för användaren.

Välj om sidan ska ha uttrycksfält, dvs. bygga meningar istället för att ha "direkta kommunikationsknappar"



LANDSTINGET
SÖRMLAND

Lägg till ny sida



För att lägga till en ny sida i din bok måste man gå till bokens sista sida och klicka på +. Då kommer det upp en lista med alternativ att välja på.






Hämta hem andras sparade böcker som de laddat upp.

Gör en ny mall med sidor som kan användas i flera böcker.

Importera en sida från en av de andra böckerna i appen.

Importera sida/sidor från en annan bok.

Klicka på "Importera från en annan bok" och välj vilken bok.

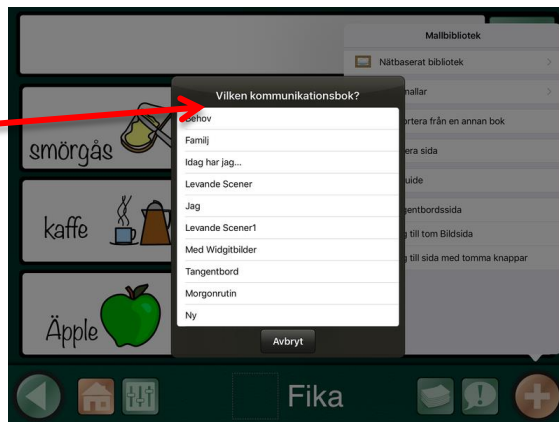


Välj vilken/vilka sidor du vill importera till denna bok.



Kopiera sida i befintlig bok

Välj "Kopiera sida" och välj sedan vilken sida som ska kopieras.

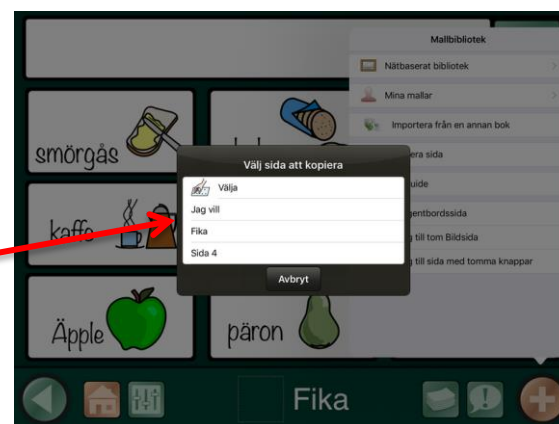

Snabb redigering av ny knapp sida




Tryck på sidguide
för snabb
redigering av ny
knapp sida

Välj redan här vad sidan ska heta

Eftersom bildbaserna är på engelska men appen nu ska användas på svenska bör "Inga" väljas här då appen inte kommer kunna använda svenska ord som sökord för att hitta bilder.


Här väljs om det ska finnas uttrycksfält till att bygga meningar på sidan.

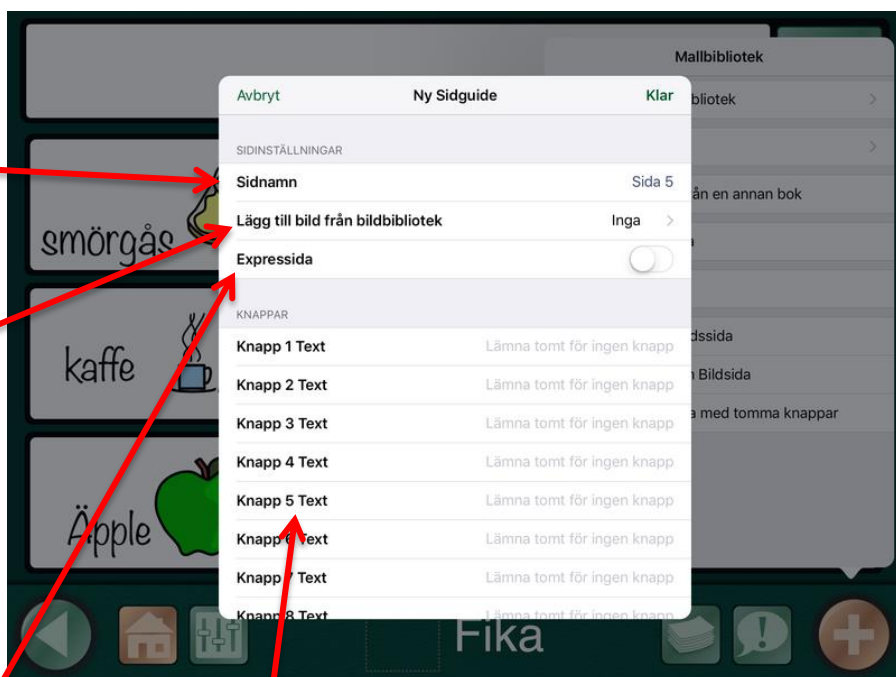

Klicka i och skriv vad rutan ska säga (bilder får läggas in manuellt sen). Fyll i antalet knappar det ska vara på sidan.



Tangentbordssida

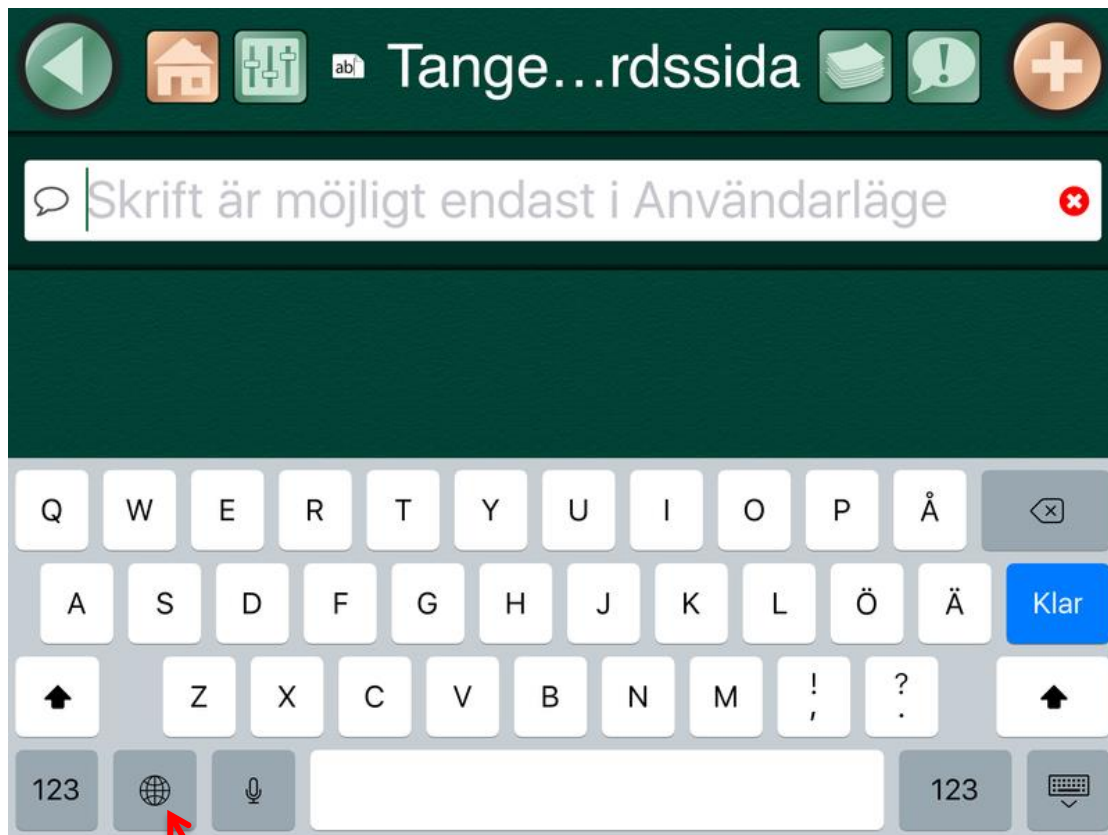

Tangentbordsyta, där man kan byta tangentbord till t.ex. SwiftKey. Tangentbordet har ordprediktion och talsyntes. Med SwiftKey-tangentbord fungerar swipe.*

*Swipe är en funktion där man inte behöver lyfta upp fingret mellan tangenterna utan kan dra fingret över tangentbordet.




Redigera knapp sida

Klicka i rutan
som ska
redigeras




Ändra texten i
knappen/rutan
genom att klicka
på orden i den
eller gå in på
knapptext.

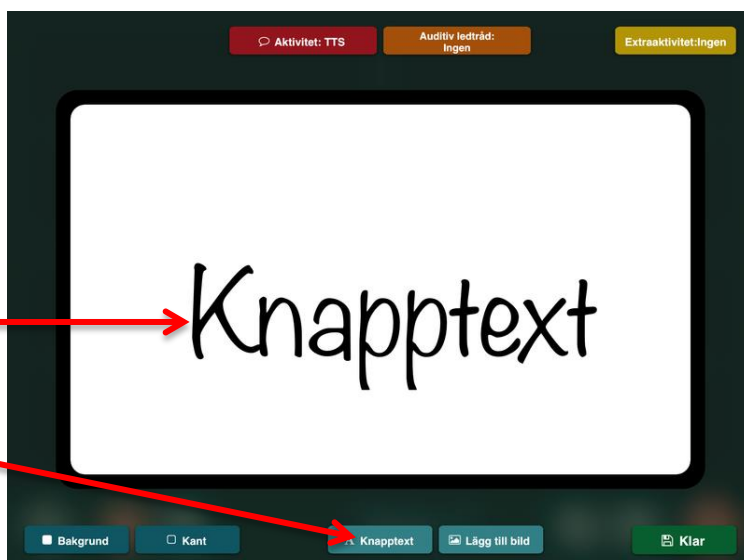


För att lägga till en eller flera bilder klickar man på "Lägg till bild" och väljer vart bilden ska hämtas ifrån.

- GoTalks bildbibliotek (sökord på engelska)
- Bildbas Widigtbilder (om ni lagt till detta i förskrivningen, även detta sökbart enbart på engelska)
- Internetsökning
- Ta ett foto direkt i appen (bilden hamnar bara i appen och kan inte återanvändas)
- Använd foton från iPadens galleri

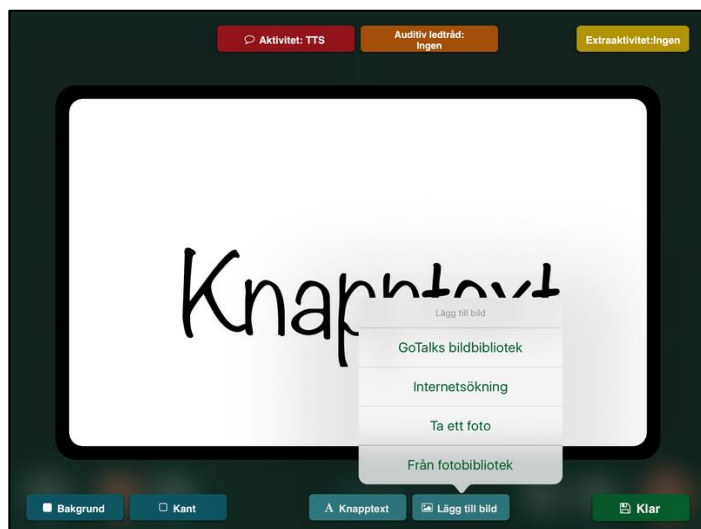


Ska rutan säga annat än den text som står i rutan ställs det in under "Aktivitet"

- Spela in eget meddelande
- Använd talsyntesen
- Gör knappen till en länk till en annan sida/bok.
- Starta mediaspelaren
- URL dvs. koppla knappen till en webbadress och internet nås om WiFi uppkoppling finns
- Hue Light Control – omgivningskontroll
- Video – lägg till en film som finns på enheten som då spelas upp i knappen

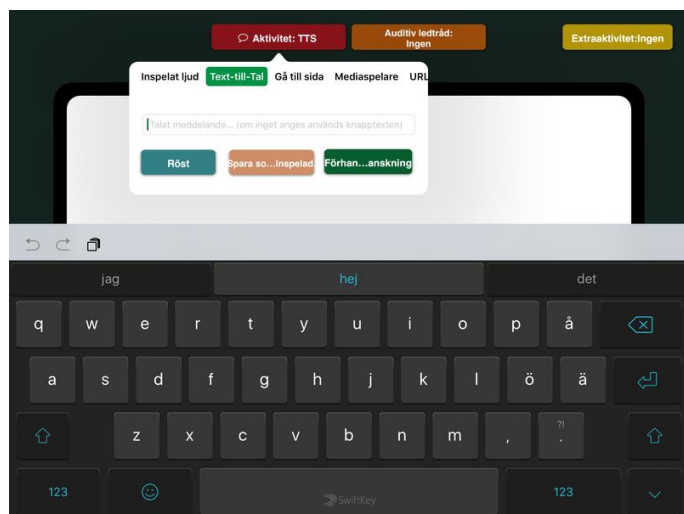


Ställ in om knappen ska berätta vad den handlar om

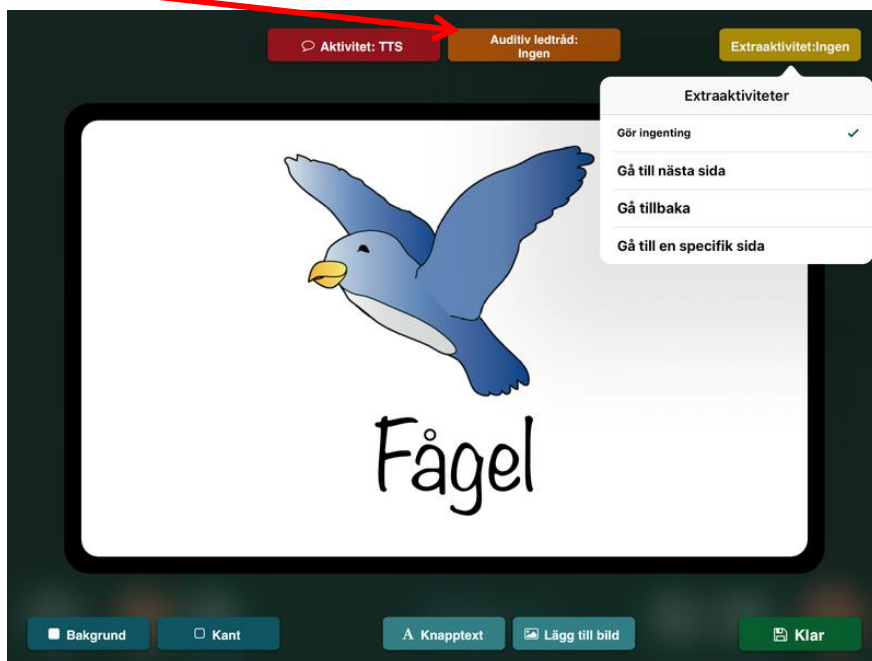


Länka till en sida eller bok

Gå in på den gula knappen "extraaktivitet". För att gå till en specifik sida tryck "välj". En lista över sidorna i boken som är aktiv kommer upp.

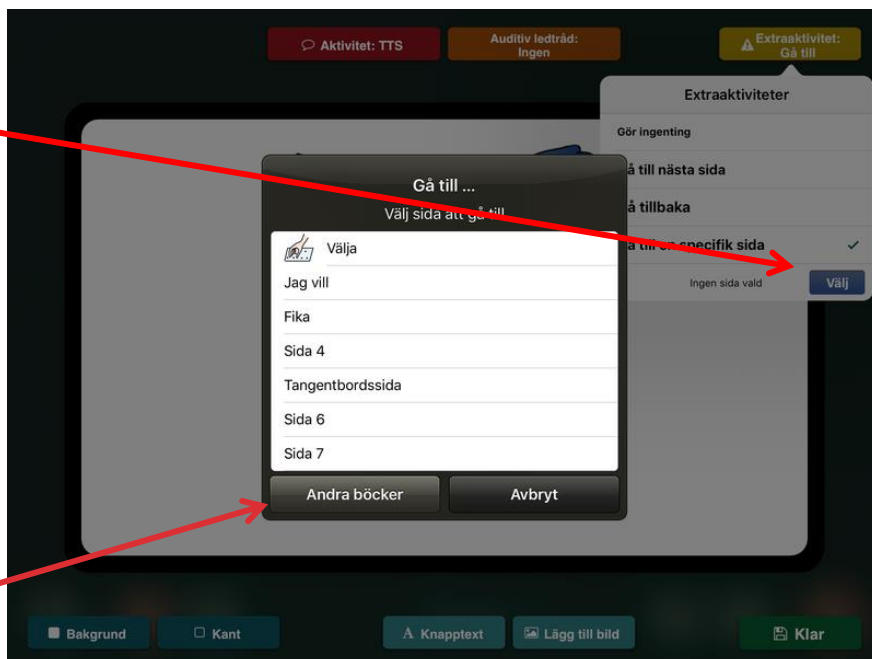


För att välja att rutan ska leda till en annan bok väljs andra böcker.



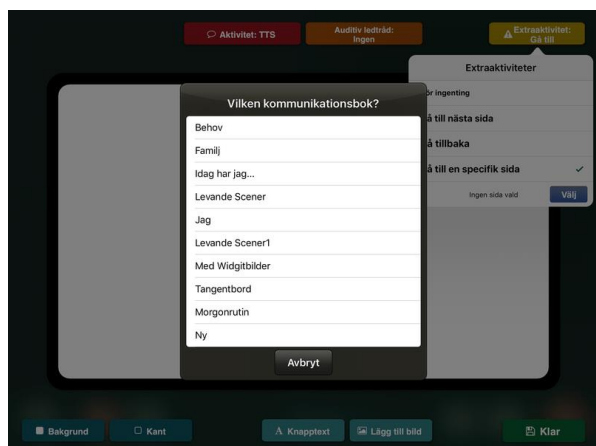

Då kommer det upp en lista med de andra böckerna i appen som man kan välja ifrån.

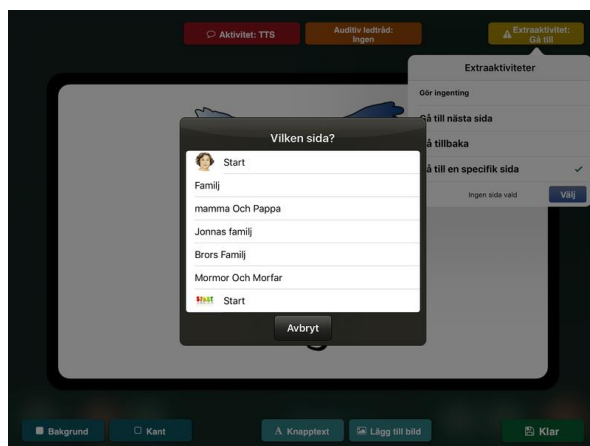


När en bok är vald väljs vilken sida i boken knappen ska länkas till.



Radera, byt plats på, kopiera eller avaktivera en knapp

För att ändra placeringen av en knapp eller radera den hålls ett finger på den i redigeringsläget tills rutan med alternativ kommer upp – välj vad som ska göras

För att byta plats på knappen klickar man på rutan den ska flyttas till - rutorna kommer då byta plats med varandra.

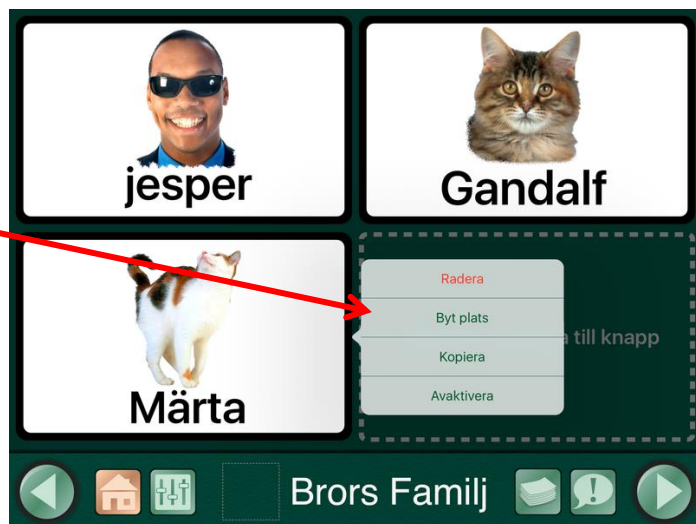


Lägg till bildsida



Tryck på Lägg till tom Bildsida för att skapa en ny sida med en bild i.

Redigera bildsida

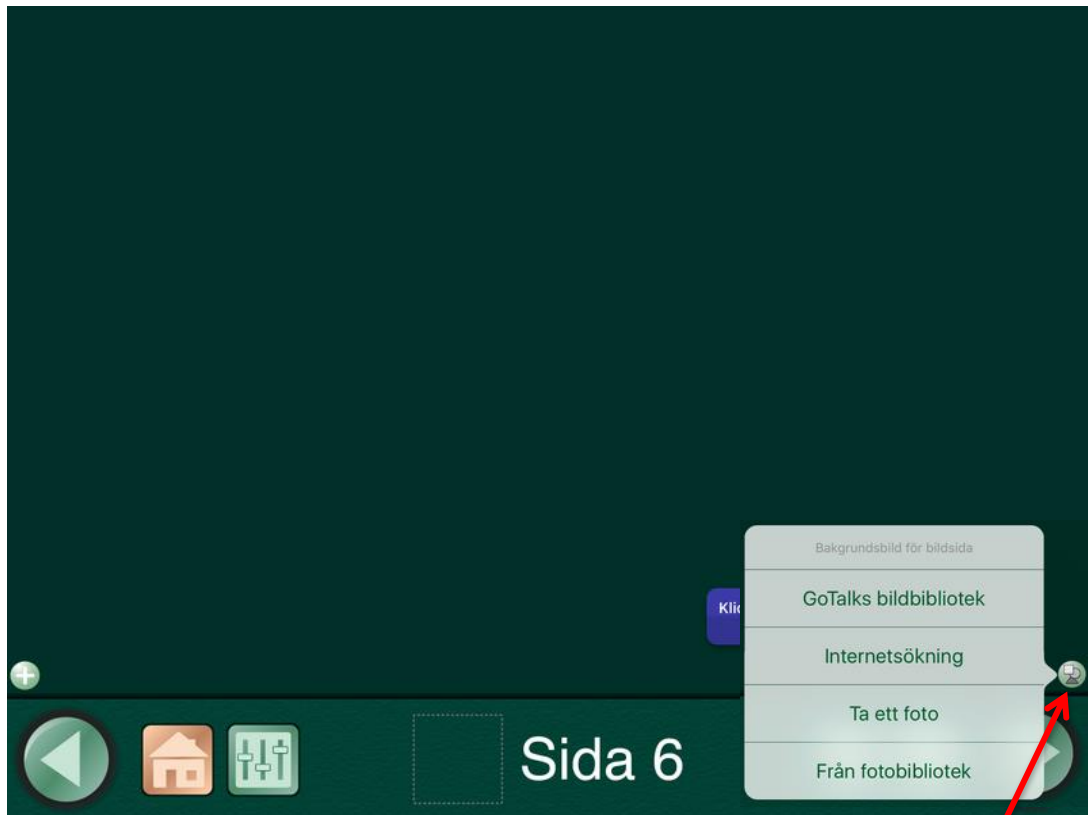

Välj bild nere i högra hörnet. Fota, hämta från fotobiblioteket, hämta från internet eller från bildbaserna.






När bilden är vald och placerad där den ska vara är det smart att låsa den så att den inte flyttar runt.

Klicka på + för att lägga till en valbar yta



Den blåa valbara ytan kan placeras vart som helst och göras större eller mindre.

Klicka på den en gång så kommer det upp alternativ på hur den kan programmeras. Alternativen som kommer upp är liknande de som finns för knapparna på en rut-sida.

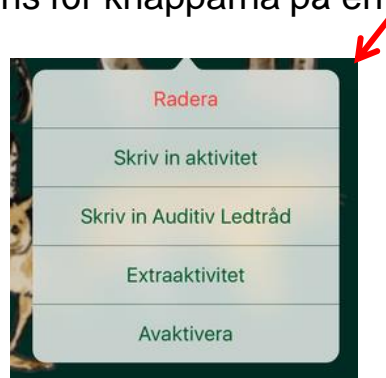

Gå in på sidans inställningar och aktivera "markera valbara ytor i Användarläge" om den blåa valbara rutan ska synas i användarläget.



Lägga in filmer


För att lägga till filmer i Go Talk NOW kan man använda dels filmer från YouTube eller filmer som man filmat själv. Tänk på att filmer tar mer plats än bilder och med mycket filmer på surfplattan så finns det en risk att minnet blir fullt. Nedan finns en beskrivning på hur man lägger in filmer.

För att kunna infoga en video måste filmen ligga bland Bilder på iPaden.

1. Gå in på knappen i redigeringsläge.



2. Klicka på Aktivitet, den röda knappen. Välj Video längst till höger i menyraden som dyker upp (scrolla genom att göra en swipe med fingret). Klicka på Välj Video.

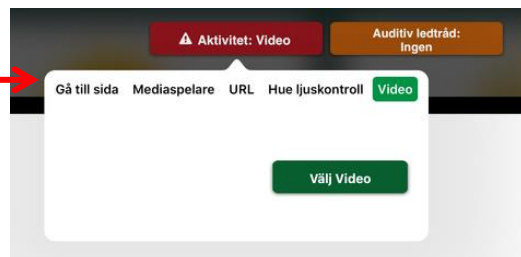

3. Välj var videon finns. Det finns två val; antingen i mappen kamerarulle, alltså den mapp där alla foto/filmer som tas med iPaden hamnar eller som synkas dit med iTunes. Man kan också välja att plocka en video från Dropbox, en särskild app med tillhörande tjänst för att flytta filer mellan datorer, surfplattor och telefoner.



4. Välj "På min iPads Kamerarulle" och leta fram videon. Därefter ska videon markeras och till sist tryck använd.

